



ОКУЦЕЛЛ®

форте

глазные капли

Стерильный увлажняющий офтальмологический раствор, содержащий 10 мл натрия гиалуроната 0,4% во флаконе.

Состав: натрия гиалуронат 0,4%, двухосновный натрия фосфат додекагидрат; одноосновный натрия фосфат моногидрат; натрия хлорид; вода.

Изделие медицинского назначения. Не содержит консервантов.

Что собой представляет? Окуцелл® форте глазные капли - это стерильный офтальмологический раствор. Упаковка содержит один флакон объемом 10 мл (что эквивалентно более чем 250 каплям), оснащенный инновационным запатентованным офтальмологическим дозатором нажимного типа без консервантов для многократного применения. Офтальмологический дозатор нажимного типа предотвращает попадание потенциально опасных бактерий в раствор и сохраняет его стерильным до 120 дней после первого применения.

Что такое Окуцелл® форте глазные капли ?

Окуцелл® форте глазные капли - это 0,4% офтальмологический раствор высокомолекулярного натрия гиалуроната, полученного методом биотехнологического синтеза. Гиалуронат натрия способен имитировать свойства слизистой оболочки, обладает мукоадгезивными и вязкоэластичными свойствами, улучшающими стабильность слезной пленки и обеспечивающими комфорт поверхности глаз: смазку, увлажненность и защиту.

Когда следует использовать Окуцелл® форте глазные капли?

Увлажняющие и защитные свойства гиалуроната натрия уменьшают раздражение, сухость, жжение и ощущение инородного тела в глазах при действии таких факторов окружающей среды, как ветер, солнце, сухой воздух, соленая вода, дым, чрезмерный свет, кондиционирование воздуха, отопление, длительное пребывание за компьютером, или после выполнения операций на глазах, конъюнктивита, а также частого и длительного использования контактных линз.

Как использовать Окуцелл® форте глазные капли? Закапывать по одной капле в каждый глаз 2-3 раза в день по мере необходимости. Закапать одну каплю в глаз, слегка надавливая на корпус флакона.

Особые указания и меры предосторожности

- Не использовать в случае повреждения упаковки.
- Не использовать одновременно с препаратами, содержащими четвертичные аммониевые соли
- Не использовать при повышенной чувствительности к любому из компонентов
- Не использовать после истечения срока годности, указанного на флаконе и на внешней упаковке.
- Не касаться глаза кончиком флакона.
- В редких случаях после применения может наблюдаться временное лёгкое затуманивание зрения из-за вязкости раствора. Поэтому рекомендуется подождать несколько секунд перед любой деятельностью, которая требует четкого зрения.
- Соблюдайте не менее 10-15 минут между использованием любых других офтальмологических препаратов для наружного применения
- Выбросить флакон через 120 дней после первого вскрытия.
- Пожалуйста, после использования утилизируйте флакон надлежащим образом.
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не проглатывать.
- Изделие предназначено только для местного офтальмологического применения.
- Хранить при комнатной температуре.
- Как правило, изделие предназначено для непрерывного использования не более 30 дней; при сохранении симптомов следует обратиться к врачу.
- Изделие содержит фосфаты. Имеются сообщения о редких случаях кальцификации роговицы при использовании глазных капель, содержащих фосфаты, у некоторых пациентов со значительными повреждениями роговицы. Поэтому не рекомендуется использовать препарат у пациентов с тяжёлыми повреждениями поверхности роговицы (такими, как выраженная эрозия или язва роговицы).

Получить дополнительную информацию можно по адресу:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ООО «PHARMASELECT INTERNATIONAL BETEILIGUNGS GMBH» (АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА) В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
220113, г. Минск, ул. Мележа, д.1, офис 1601
тел./факс: (+37517) 268-46-84
office-by@pharmaselect.com

Производитель:
«NTC S.r.l.» [NTC S.r.l.],
Виа Луиджи Рацца 3
(Via Luigi Razza 3)
20124 Милан, Италия

Дата ред.: July 2018
OKFBGBY101-01-1708



LFHYS10300

NTC S.r.l.
Monica Colleoni
Head of Regulatory
& Quality