



## ИНСТРУКЦИЯ по применению

Устройство полимерное с твердым пористым стержнем для хранения и нанесения раствора перекиси водорода 3% ПВ -"ЛЕККЕР®"-3 (тип 3)  
ТУ 9398-005-54291689-2004

### 1. Назначение

Устройство предназначено обработки кожи и профилактики раневой инфекции.

Раствор перекиси водорода 3% обладает антисептическим и гемостатическим свойствами. Без рецепта врача.

Рекомендации по применению:

- поверхностные раны
- ссадины, порезы
- мелкие кровотечения из поверхностных ран

### 2. Способ применения

Наружно для индивидуального применения. Поврежденные участки кожи обрабатывают раствором по мере необходимости.

- Открыть колпачок;
- При помощи стержня обработать края раны или участок кожного покрова;
- Закрыть колпачок.

### 3. Меры предосторожности.

Противопоказано при индивидуальной непереносимости используемого раствора. При обработке ран, ссадин возможно кратковременное ощущение жжения, которое проходит самостоятельно. Следует избегать попадания в глаза.

### 4. Правила хранения и использования

Хранить плотно закрытым, в недоступном для детей месте при температуре от 5<sup>0</sup> до 25<sup>0</sup> С.

Срок годности 1,5 года (18 месяцев)