

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО СТЕРИЛЬНОГО «ТАЛЛМИН-БЕЛ»

Изделие медицинское гемостатическое стерильное «ТАЛЛМИН-БЕЛ» (далее – изделие гемостатическое) предназначено для применения в качестве местного гемостатического средства при состояниях, связанных с кровотечениями: для остановки кровотечения из локальных поверхностных ран кожи и подкожной клетчатки, носовых и других кровотечений.

Изделие гемостатическое представляет собой изделие из текстильных материалов, пропитанных раствором смеси солей алюминия хлорида гексагидрата и железа хлорида гексагидрата.

2 ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Изделие гемостатическое оказывает быстрое местное гемостатическое действие, наступающее после нанесения непосредственно на раневую поверхность в течение 7-30 секунд. Обеспечивает формирование и организацию кровяного сгустка, который плотно фиксируется на раневой поверхности. Изделие гемостатическое обладает антисептическим и противоотечным действием.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки изделия гемостатического приведен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество в первичной упаковке, шт.
Изделие гемостатическое	От 1 до 5
Инструкция по применению	1*

* - инструкцию по применению допускается наносить непосредственно на первичную упаковку.

4 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Изделие гемостатическое применяют только местно. Недопустимо попадание активных веществ изделия гемостатического в системный кровоток.

Для остановки кровотечений из локальных поверхностных ран кожи и подкожной клетчатки, носовых и других кровотечений:

- вскрыть упаковку;
- извлечь и развернуть изделие гемостатическое;
- приложить изделие гемостатическое к кровоточащей поверхности и слегка прижать.

Время экспозиции необходимой для достижения полного гемостаза составляет 10-15 секунд. При необходимости его можно довести до 30 секунд.

5 ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

При применении изделия гемостатического (при обработке повреждений кожи) возможно временное окрашивание кожи в желто-коричневый цвет, которое исчезает после прекращения применения гемостатического изделия.

6 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не допускать попадания пропитывающего состава изделия гемостатического на слизистую поверхность глаз.

7 СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности изделия гемостатического – 3 года от даты его изготовления.

8 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

8.1 Условия транспортирования изделия гемостатического должны соответствовать условиям его хранения.

8.2 Изделие гемостатическое перевозится всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта при температуре от 5°C до плюс 40 °C.

8.3 Изделие гемостатическое должно храниться при температуре от 5°C до плюс 40 °C в сухом, защищенном от света месте в течение всего срока годности.

9 ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ООО «ТАЛЛИМИН МЕДИКАЛ»

220118, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Шишкина дом 20, корп. 1, пом. 4Н.

УНП 193269404.